



DR DAVID HOSANA - MÉDECIN ESTHÉTIQUE - LASÉRISTE - SURSEINS

BTL EMSCULPT

INTERVIEW MIREILLE PELLERIN

20 000 ABDOS EN 30 MINUTES...

VOILÀ CE QUE NOUS PROPOSE EMSCULPT DE BTL. POUR NOUS PARLER DE CETTE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE, NOUS AVONS INTERVIEWÉ LE **DR DAVID HOSANA**.

L'EMSCULPT: QU'EST-CE QUE C'EST?

Avant tout l'essai d'une nouvelle technologie dans le domaine du body-shaping qui utilise les ondes électromagnétiques focalisées de haute intensité. Plus précisément, 5 impulsions par seconde sont envoyées, provoquant des contractions musculaires dites «supramaximales», soit en tout 20 000 contractions par séance de

30 min. La forte réponse énergétique générée par ces contractions entraîne une libération d'acides gras provoquant la destruction des adipocytes, lesquels sont ensuite drainés par l'organisme.

QU'EST-CE QUI VOUS A AMENÉ À ADOPTER EMSCULPT DANS VOTRE CABINET?

Il y a deux raisons principales,

mais d'abord, j'ai découvert EMSculpt via les réseaux sociaux. Je me suis renseigné pour savoir que c'était cette nouvelle technologie et j'ai appelé BTL.

Les deux raisons qui m'ont fait prendre cette décision? Premièrement, le fait de traiter ce manière totalement non invasive, une zone, notamment les fesses, que l'on ne pouvait traiter jusqu'à présent avec aucune technologie.

La deuxième raison, ce sont les suites du traitement et les risques. Il n'y a aucun risque, aucun danger lorsqu'on fait un traitement. Une séance EMSculpt n'est zéro risque! Il n'y a pas d'effet secondaire possible. C'est la sécurité de la technologie qui m'a convaincu.

Au total, on peut espérer des gains de + 16 % de muscles et une perte de - 19 % de graisse sur les zones traitées.

C'est actuellement la seule technologie non invasive au monde permettant une action musculaire: elle est agréée par la FDA comme technique permettant l'amélioration du tonus abdominal, le renforcement des muscles abdominaux, la tonification et le raffermissement des fesses et des quadriceps.

EMSculpt permet également d'améliorer le diastasis des abdominaux post grossesse et de soulager certains maux de dos en corrigeant la posture par renforcement musculaire.

QUELLES SONT SELON VOUS LES CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES D'EMSCULPT?

On a en fait deux actions. La première action a lieu via les ondes électromagnétiques focalisées de haute intensité sur les

muscles, qui entraîne des contractions sur les muscles. On va ainsi augmenter la masse musculaire ce qui permet d'avoir plus de fibres musculaires.

Deuxième effet, les contractions musculaires envoient un message du muscle vers la graisse: avoir une action sur la graisse. On a donc une action sur les muscles et une action sur la graisse. On gagne environ 20 % de muscle et on perd 20 % de graisse.

QUELS SONT LES AVANTAGES?

- EMSculpt permet de traiter de grandes zones. Quand on traite les abdominaux, le ventre par exemple, on traite tout le ventre, avec un prix très intéressant par rapport à la cryo. EMSculpt et la cryo sont actuellement les deux technologies non invasives pour traiter la silhouette.
- La sécurité.
- Les résultats visibles dès la première séance. Une partie de l'action musculaire se voit

- tout de suite. En cryo il faut patienter 8 à 10 semaines. Pour EMSculpt on a des patients qui arrivent en plein mois de juillet et qui auront de superbes résultats au mois d'août!
- Les résultats sont considérés comme définitifs après 9 semaines.
- Aucune crainte, aucune douleur.
- Aucune éviction sociale.
- C'est un traitement facile pour le médecin et pour les patients.
- En 30 minutes le patient fait 20 000 abdos!
- Aucune précaution à prendre (soleil, médication, etc...).

QUELLES SONT LES BONNES INDICATIONS?

Les fesses et le ventre sont les deux seules zones que l'on peut traiter actuellement.

COMBIEN DE TEMPS DURE UNE SÉANCE?

Chaque séance dure 30 minutes. Le protocole traditionnel prévoit 4 séances à réaliser en 15 jours.